




Smart diaper Abena Nova

Welke digitale vaardigheden zijn vereist voor het gebruik van dit e-healthproduct?

Afbeelding product	
Omschrijving product	<p>De Abena Nova is slim incontinentiemateriaal dat een chip bevat in de inlegger die via een beacon communiceert met een app en gegevens doorgeeft over het urineverlies. Dankzij de innovatieve sensorentechnologie geeft de Abena Nova inzicht in het ideale moment van verschonen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven van mensen in zorginstellingen en vermindert de werkdruk van zorgmedewerkers.</p>
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none">▪ Mensen met een lichamelijke beperking▪ Mensen met een ernstig verstandelijke beperking die niet zindelijk zijn
Thema en mogelijke cliëntdoelen	<ul style="list-style-type: none">○ Welzijn
Benodigde digitale vaardigheden cliënt	<p>De cliënt zelf heeft geen digitale vaardigheden nodig. De zorgprofessional plaatst, verbindt de sensor en leest de gegevens af.</p>
Benodigde digitale vaardigheden zorgprofessional	<ul style="list-style-type: none">• Kunnen benoemen wat de functie van de smart diaper is• Begrijpen dat de smart diaper functioneert op basis van een goed werkend netwerk• Weten wat een WIFI-netwerk is• Het aansluiten en bedienen van de diaper, weten welk (WIFI)netwerk nodig is om de diaper mee te verbinden• Weten hoe je netwerk heet en hoe je er contact mee maakt vanuit het apparaat wat je gebruikt• Een wachtwoord correct kunnen invoeren• Verschillende tekens kennen en weten waar je ze op het toetsenbord kunt vinden, bijvoorbeeld hoe je hoofdletters maakt• Weten wat een Webapp is en waar je deze kunt vinden• App installeren op je telefoon• Set-upprocedure doorlopen• Weten wat een platform is en wat je op en via dit platform kunt doen• Connectie met de slimme inco kunnen maken door de sensorclip op de juiste plek te plaatsen van het incontinentiesysteem• Data interpreteren die op de telefoon binnenkomen (vanuit de cloud worden na bevestiging signalen doorgestuurd naar de

	<p>telefoon waarop de professional kan inloggen en de voortgang ziet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weten voor wie het slimme incontinentiemateriaal geschikt is • Nadenken over de gevolgen van de inzet van deze technologie • Weten wat te doen als de technologie hapert of faalt • Risico-inschatting maken (RI&E) • App kunnen downloaden
Moeilijkheidsgraad medewerker	<p>1 Plug & Play 2 Specifieke of aanvullende handeling nodig 3 Expert</p>
Meer informatie	
Bijzonderheden	https://www.abena.nl/abena-nova